



InnZ Medical AS

Org.nr. 912 586 456 MVA
Adresse: Basbergveien 160, 3114 Tønsberg
Telefon: 90 14 14 00
Hjemmeside: www.innz.no
E-post: post@innz.no
Bankforbindelse: DNB Kontonummer 1506.19.98990
Bankkoder: BIC: DNBANOKKXXX IBAN: NO341506 1998 990

Hei på dere.

Denne skjermen er laget for å beskytte noe bedre mot dråpesmitte enn de små som følger med noen modeller spaltelampe

Den er laget med dobbel laminering og skal kunne brukes på de fleste spaltelampene med litt justering av størrelsen på hullet. Materialet er såpass tynt at det lar seg klippe i med en vanlig saks. Jeg har prøvd den slik dere mottar den nå, på Haag-Streit BQ-900. Keeler og CSO/BON.

På Topcon må hullet justeres noe,
Muligens noe tilpasning på Zeiss og Rodenstock sine modeller i tillegg.


I noen tilfeller må skjermen henges på den tykke delen av kikkerten.
(De fleste kikkerter kan separeres fra okularene med en finger-skrue hvis du må klippe større hull og sette skjermen på selve kikkerten)
Se bilder for en ide om hvordan det kan gjøres.

Ha en fin dag og ta gjerne kontakt hvis noe er usikkert!

Hilsen Dag

Med vennlig hilsen

InnZ Medical AS

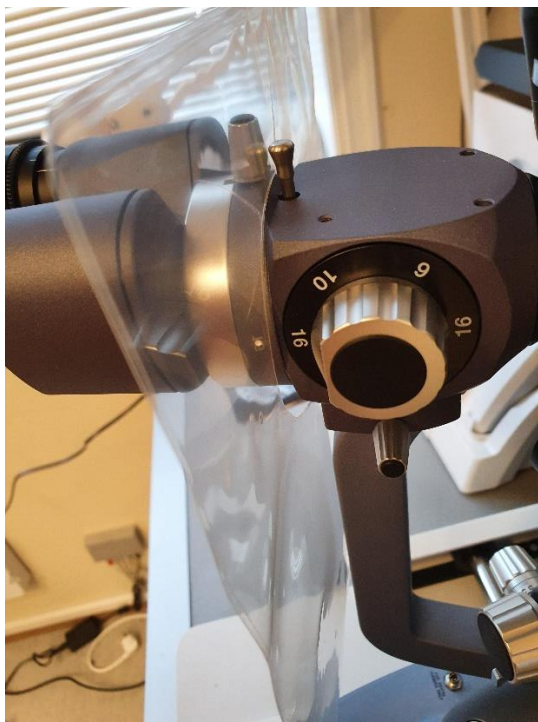


Montert på kikkerten



Montert bak okularene som i filmen

**Bilder nedenfor gjelder stor skjerm som er sendt til sykehus og klinikker
Klipp langs den stiplede linjen og tre bak okularene som vist på filmen på www.innz.no
Trekk litt fra hverandre og tre bak okularene,
NB Hullet er ikke midt på skjermen den kan roteres hvis man ønsker mer skjerming enten
oppe eller nede**

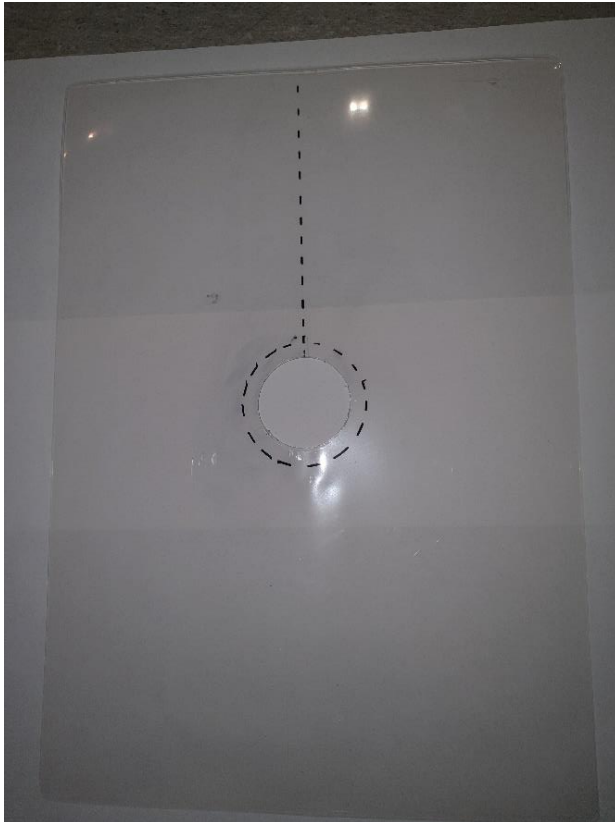

**Klipp langs den loddrette linjen
Utvid hullet hvis det er nødvendig**



Trekk flikene fra hverandre og tre bak okularene



Ferdig montert



Oversiktsbilde av spaltelampe med stor skjerm